

INSTRUCCIONES DE USO


VANTELIN: MUÑEQUERA

GUÍA DE TALLAS

S: 5.5-6 in / 13-15 cm


M: 6-6.5 in / 15-17 cm

L: 6.5-7.5 in / 17-19 cm

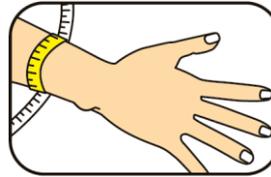

Mida alrededor del brazo aproximadamente 7 cm por sobre la muñeca. Si la medida se encuentra entre dos tallas, elija la más grande.

CARACTERÍSTICAS

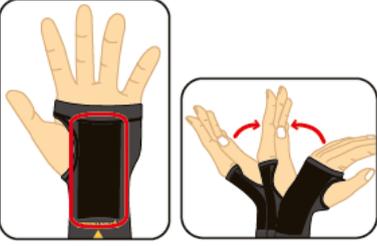	<p>Estructura de taping tipo Sándwich</p> <p>La estructura de taping tipo sándwich, en la parte delantera y trasera de la muñequera, funciona como una férula para limitar el movimiento excesivo y reducir las molestias.</p>
	<p>Estructura de Bloqueo de la base del Pulgar</p> <p>Mantiene la posición correcta de la muñequera al mismo tiempo que permite el libre movimiento del pulgar.</p>
	<p>Estructura de anclaje</p> <p>Bordes firmes y especialmente confeccionados sin costura que previenen el deslizamiento y estabilizan la estructura de taping.</p>


INDICACIÓN

Utilizar para molestias diarias en las articulaciones.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Deslice la mano dentro de la muñequera por la parte inferior de la "V" apuntando hacia los dedos y el pulgar sobresaliendo por el orificio.
2. Estire la muñequera y asegúrese de que las estructuras de malla tejida estén rectas y centradas en la parte superior e inferior de la muñeca. No estire demasiado la muñequera ya que puede ejercer presión sobre la parte posterior de su dedo pulgar.
 - Use siempre directamente sobre la piel.
 - En el caso que la muñequera no esté posicionada correctamente, es posible que no funcione según lo previsto.

* Las funciones que se obtienen con el uso de la muñequera pueden variar según cada persona.

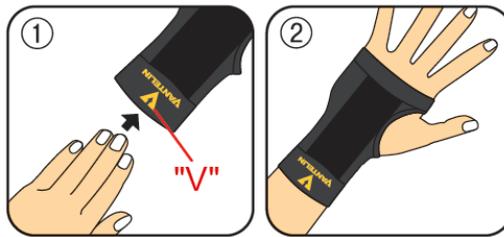

ADVERTENCIA

- No utilizar si tiene: (1) anomalías incluyendo hinchazón o dolor fuerte debido a un esguince, fractura, lesión de ligamentos, ect., (2) trastornos vasculares periféricos, (3) anomalías como alguna lesión, hinchazón, o sarpullido en donde se va a utilizar el producto, o (4) dermatitis crónica / alergia a textiles químicos o látex. Detenga su uso inmediatamente y consulte a su médico si presenta síntomas como: sarpullido / enrojecimiento, picazón, erupción, congestión, dolor anormal o hinchazón.
- Use solamente según lo indicado.
- Use la talla correcta.
- No utilice mientras duerme.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO (Use malla de lavandería)

1. Lavar por separado, por debajo de los 30° C.
2. No usar blanqueador.
3. No secar a máquina.
4. Colgar y secar al aire. Evite que reciba luz solar directamente.
5. Planchar a baja temperatura. No planchar con vapor.
6. No lavar en seco.

PRECAUCIONES PARA ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

1. Mantener alejado del fuego o del calor excesivo.
2. Mantener fuera del alcance de los niños.
3. Existe el riesgo de romper el producto si es usado de manera incorrecta o si se aplica una fuerza parcialmente desmedida.

PRESENTACIÓN

1 unidad

FABRICADO POR:

Kowa Company, Ltd.

4-14, Nihonbashi-honcho 3-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN

LUGAR DE FABRICACIÓN:

IIDA HOSIERY CO., LTD.

1619, Yamaguchi, Kouhoku-machi, Kishima-gun, Saga-Ken 849-0501 Japan