

INSTRUCCIONES DE USO

VANTELIN: RODILLERA


GUÍA DE TALLAS

S: 12-13 in / 31-34 cm

M: 13-14.5 in / 34-37 cm

L: 14.5-16 in / 37-40 cm

XL: 16-17 in / 40-43 cm

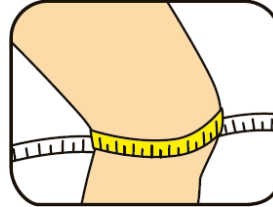

Mida alrededor de la rodilla como se muestra en la imagen. Si la medida se encuentra entre dos tallas, elija la más grande.

CARACTERÍSTICAS


	<p>Estructura de taping en forma de U</p> <p>La estructura de taping en forma de U sostiene la rótula para reducir la tensión en el tendón rotuliano al extender la rodilla.</p>
	<p>Estructura de Slit Knit</p> <p>Los paneles de malla transpirables, en la parte delantera y trasera, brindan ventilación y reducen el agrupamiento detrás de la rodilla.</p>
	<p>Estructura de anclaje</p> <p>Bordes firmes y especialmente confeccionados sin costura que previenen el deslizamiento y estabilizan la estructura de taping en forma de U.</p>

INDICACIÓN

Utilizar para molestias diarias en las articulaciones.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Deslice la pierna dentro de la rodillera con la parte inferior de la "V" apuntando hacia abajo.
 2. Coloque la estructura de taping en forma de U debajo y en ambos lados de la rodilla. Estire la rodillera para que no se amontone cuando extienda la rodilla.
 - Use siempre directamente sobre la piel.
 - En el caso que la rodillera no esté posicionada correctamente, es posible que no funcione según lo previsto.
- * Las funciones que se obtienen con el uso de la rodillera pueden variar según cada persona.

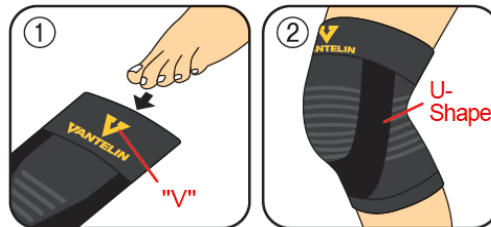

ADVERTENCIA

- No utilizar si tiene: (1) anomalías incluyendo hinchazón o dolor fuerte debido a un esguince, fractura, lesión de ligamentos, ect., (2) trastornos vasculares periféricos, (3) anomalías como alguna lesión, hinchazón, o sarpullido en donde se va a utilizar el producto, o (4) dermatitis crónica / alergia a textiles químicos o látex. Detenga su uso inmediatamente y consulte a su médico si presenta síntomas como: sarpullido / enrojecimiento, picazón, erupción, congestión, dolor anormal o hinchazón.
- Use solamente según lo indicado.
- Use la talla correcta.
- No utilice mientras duerme.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO (Use malla de lavandería)

1. Lavar por separado, por debajo de los 30° C.
2. No usar blanqueador.
3. No secar a máquina.
4. Colgar y secar al aire. Evite que reciba luz solar directamente.
5. Planchar a baja temperatura. No planchar con vapor.
6. No lavar en seco.

PRECAUCIONES PARA ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

1. Mantener alejado del fuego o del calor excesivo.
2. Mantener fuera del alcance de los niños.
3. Existe el riesgo de romper el producto si es usado de manera incorrecta o si se aplica una fuerza parcialmente desmedida.

PRESENTACIÓN

1 unidad

FABRICADO POR:

Kowa Company, Ltd.

4-14, Nihonbashi-honcho 3-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN

LUGAR DE FABRICACIÓN:

IIDA HOSIERY CO., LTD.

1619, Yamaguchi, Kouhoku-machi, Kishima-gun, Saga-Ken 849-0501 Japan