

INSTRUCCIONES DE USO


VANTELIN: MUÑEQUERA

GUÍA DE TALLAS

S: 5.5-6 in / 13-15 cm


M: 6-6.5 in / 15-17 cm

L: 6.5-7.5 in / 17-19 cm

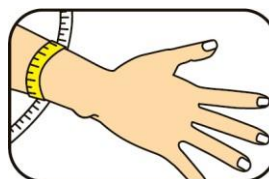

Mida alrededor del brazo aproximadamente 7 cm por sobre la muñeca. Si la medida se encuentra entre dos tallas, elija la más grande.

CARACTERÍSTICAS

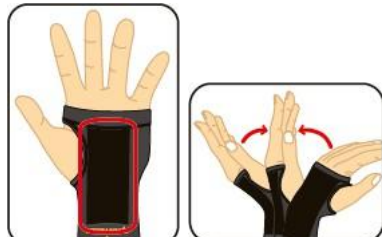	Estructura de taping tipo Sándwich La estructura de taping tipo sándwich, en la parte delantera y trasera de la muñequera, funciona como una férula para limitar el movimiento excesivo y reducir las molestias.
	Estructura de Bloqueo de la base del Pulgar Mantiene la posición correcta de la muñequera al mismo tiempo que permite el libre movimiento del pulgar.
	Estructura de anclaje Bordes firmes y especialmente confeccionados sin costura que previenen el deslizamiento y estabilizan la estructura de taping.

INDICACIÓN

Utilizar para molestias diarias en las articulaciones.


INSTRUCCIONES DE USO

1. Deslice la mano dentro de la muñequera por la parte inferior de la “V” apuntando hacia los dedos y el pulgar sobresaliendo por el orificio.
2. Estire la muñequera y asegúrese de que las estructuras de malla tejida estén rectas y centradas en la parte superior e inferior de la muñeca. No estire demasiado la muñequera ya que puede ejercer presión sobre la parte posterior de su dedo pulgar.

• Use siempre directamente sobre la piel.

• En el caso que la muñequera no esté posicionada correctamente, es posible que no funcione según lo previsto.

* Las funciones que se obtienen con el uso de la muñequera pueden variar según cada persona.

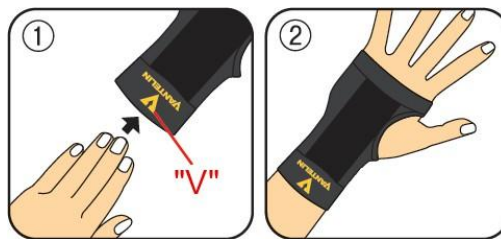

ADVERTENCIA

- No utilizar si tiene: (1) anomalías incluyendo hinchazón o dolor fuerte debido a un esguince, fractura, lesión de ligamentos, ect., (2) trastornos vasculares periféricos, (3) anomalías como alguna lesión, hinchazón, o sarpullido en donde se va a utilizar el producto, o (4) dermatitis crónica / alergia a textiles químicos o látex. Detenga su uso inmediatamente y consulte a su médico si presenta síntomas como: sarpullido / enrojecimiento, picazón, erupción, congestión, dolor anormal o hinchazón.
- Use solamente según lo indicado.
- Use la talla correcta.
- No utilice mientras duerme.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO (Use malla de lavandería)

1. Lavar por separado, por debajo de los 30° C.
2. No usar blanqueador.
3. No secar a máquina.
4. Colgar y secar al aire. Evite que reciba luz solar directamente.
5. Planchar a baja temperatura. No planchar con vapor.
6. No lavar en seco.

PRECAUCIONES PARA ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

1. Mantener alejado del fuego o del calor excesivo.
2. Mantener fuera del alcance de los niños.
3. Existe el riesgo de romper el producto si es usado de manera incorrecta o si se aplica una fuerza parcialmente desmedida.

PRESENTACIÓN

1 unidad

FABRICADO POR:

Kowa Company, Ltd.

4-14, Nihonbashi-honcho 3-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN

LUGAR DE FABRICACIÓN:

IIDA HOSIERY CO., LTD.

1619, Yamaguchi, Kouhoku-machi, Kishima-gun, Saga-Ken 849-0501 Japan