

## INSTRUCCIONES DE USO


### VANTELIN RESPALDO

#### GUÍA DE TALLAS

M : 26-34 in / 65-85 cm

L : 32-39 in / 80-100 cm

XL : 37-45 in / 95-115 cm

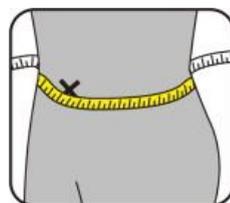

Mida su cintura a la altura del ombligo como se muestra en la imagen. Si la medida se encuentra entre dos tallas, elija la más grande.

#### CARACTERÍSTICAS

1. Restringe la flexión hacia atrás


La estructura incorporada de taping cruzado proporciona una amplia cobertura de la parte baja de la espalda. Limita el excesivo «movimiento hacia delante y hacia atrás» y la «torsión» excesiva que causa dolor.

2. Ayuda a mejorar la postura

El diseño ergonómico sujeta firmemente la parte inferior del abdomen y la zona lumbar baja para ayudar a establecer una postura saludable.

3. Transpirabilidad mejorada

El uso de un fino tejido transpirable mejora la ventilación para ayudarle a mantenerse fresco y seco.

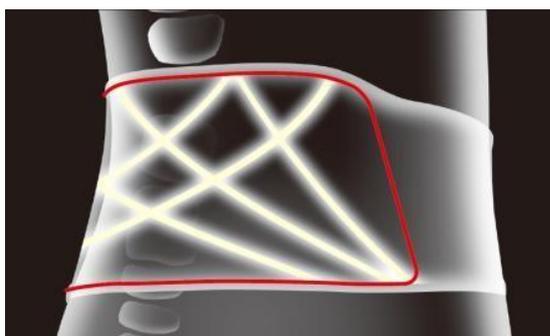

## INDICACIÓN

Utilizar para las molestias lumbares.

## INSTRUCCIONES DE USO:

Asegúrese de llevar el soporte lumbar por encima de la ropa interior.

1. Sujete el soporte lumbar con la etiqueta en el lado interior derecho (las flechas hacia arriba), y tire de él con ambas manos para que ambos lados tengan la misma longitud.
2. Tire del lado izquierdo oblicuamente hacia abajo (como guía, aprox. 5 cm/2 pulgadas por debajo del ombligo). \* No lo lleves por encima del ombligo.
3. Fije la posición de la mano izquierda y tire del lado derecho oblicuamente hacia abajo para fijar el cierre de velcro.



## ADVERTENCIA

No utilizar si tiene: (1) anomalías como hinchazón y dolor intenso en la zona lesionada, incluidos hematomas y fracturas, (2) trastornos vasculares periféricos, (3) anomalías como alguna lesión, hinchazón, o sarpullido en donde se va a utilizar el producto, o (4) dermatitis crónica / alergia a textiles químicos o látex. Detenga su uso inmediatamente y consulte a su médico si experimenta síntomas como: sarpullido / enrojecimiento, picazón, erupción, congestión, dolor anormal o hinchazón.

- No lo utilice si está o puede quedarse embarazada.
- Use la talla correcta.
- No utilice mientras duerme.
- No apriete demasiado.
- No lleve la ortesis durante periodos prolongados.
- Tenga cuidado con la ropa que se pueda estropear más rápidamente con la cinta autoadherente.
- No rasar con las uñas ni tirar con fuerza.

\* En el caso de que el soporte lumbar no este posicionado correctamente, es posible que no funcione según lo previsto.

\* Las funciones que se obtienen con el uso del soporte pueden variar dependiendo de cada persona.

#### INSTRUCCIONES DE CUIDADO (Cierre los cierres antes de lavar)

1. Lavar a mano por separado a menos de 40°C. No escurrir.
2. No usar blanqueador.
3. No secar a máquina.
4. Colgar y secar al aire. Evitar que reciba luz solar directamente.
5. No planchar.
6. No lavar en seco.
7. Limpieza suave en húmedo.

#### PRECAUCIONES PARA ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

1. Mantener alejado del fuego o del calor excesivo.
2. Mantener fuera del alcance de los niños.
3. Guarde el cierre de gancho y bucle cerrado para que no se adhieran pelusas o similares.

#### PRESENTACIÓN

1 unidad.

#### FABRICADO POR

Kowa Company, Ltd.

4-14, Nihonbashi-honcho 3-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN.

#### LUGAR DE FABRICACIÓN

Cooperativa D-M CHAIN

5-321 Osaki, Kahoku-shi, Ishikawa 929-1127 Japan