

INSTRUCCIONES DE USO


VANTELIN: RODILLERA THERMAL

GUÍA DE TALLAS

M: 13-14.5 in / 34-37 cm

L: 14.5-16 in / 37-40 cm

XL: 16-17 in / 40-43 cm

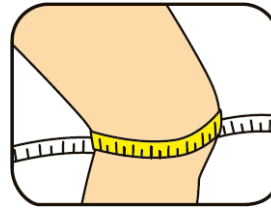

Mida alrededor de la rodilla como se muestra en la imagen. Si la medida se encuentra entre dos tallas, elija la más grande.

CARACTERÍSTICAS

	Soporte de rótula: Diseño con vendaje en forma de U que eleva la rótula y reduce el movimiento lateral, favoreciendo la estabilidad.
	Tecnología térmica Self-Heat Fiber®: Fibra auto-calentable que convierte la humedad en calor, ayudando a mantener las rodillas abrigadas en climas fríos.
	Comodidad y libertad de movimiento: Diseño elástico que no restringe, reduce molestias y se mantiene en su lugar.

La Rodillera Thermal utiliza una fibra que absorbe la humedad (como el sudor) y convierte esa energía cinética en calor cuando la humedad se adhiere a la fibra.

¿Qué es la fibra auto-calentable?


- Es una fibra que genera calor gracias a una reacción exotérmica, conocida como calor por adsorción.
- Esta reacción ocurre cuando el vapor de agua del cuerpo se convierte en agua líquida.
- El nylon fue modificado para absorber esa humedad y así generar calor de forma natural.

INDICACIÓN

Utilizar para molestias diarias en las articulaciones.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Deslice la pierna dentro de la rodillera con la parte inferior de la “V” apuntando hacia abajo.
2. Coloque la estructura de taping en forma de U debajo y en ambos lados de la rodilla. Estire la rodillera para que no se amontone cuando extienda la rodilla.
 - Use siempre directamente sobre la piel.
 - En el caso que la rodillera no esté posicionada correctamente, es posible que no funcione según lo previsto.
 - * Las funciones que se obtienen con el uso de la rodillera pueden variar según cada persona.

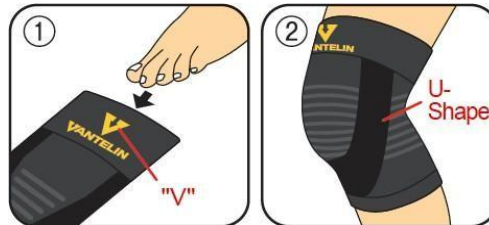

ADVERTENCIA

- No utilizar si tiene: (1) anomalías incluyendo hinchazón o dolor fuerte debido a un esguince, fractura, lesión de ligamentos, ect., (2) trastornos vasculares periféricos, (3) anomalías como alguna lesión, hinchazón, o sarpullido en donde se va a utilizar el producto, o (4) dermatitis crónica / alergia a textiles químicos o látex. Detenga su uso inmediatamente y consulte a su médico si presenta síntomas como: sarpullido / enrojecimiento, picazón, erupción, congestión, dolor anormal o hinchazón.
- Use solamente según lo indicado.
- Use la talla correcta.
- No utilice mientras duerme.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO (Use malla de lavandería)

1. Lavar por separado, por debajo de los 30° C.
2. No usar blanqueador.
3. No secar a máquina.
4. Colgar y secar al aire. Evite que reciba luz solar directamente.
5. Planchar a baja temperatura. No planchar con vapor.
6. No lavar en seco.

PRECAUCIONES PARA ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

1. Mantener alejado del fuego o del calor excesivo.
2. Mantener fuera del alcance de los niños.
3. Existe el riesgo de romper el producto si es usado de manera incorrecta o si se aplica una fuerza parcialmente desmedida.

PRESENTACIÓN

1 unidad

FABRICADO POR:

Kowa Company, Ltd.

4-14, Nihonbashi-honcho 3-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN

LUGAR DE FABRICACIÓN:

IIDA HOSIERY CO., LTD.

1619, Yamaguchi, Kouhoku-machi, Kishima-gun, Saga-Ken 849-0501 Japan