

**INSTRUCCIONES DE USO**


**VANTELIN MANGAS DE COMPRESIÓN**

**PARA BRAZOS**

**GUÍA DE TALLAS**

S-M: 21-27 cm

M-L: 27-34 cm

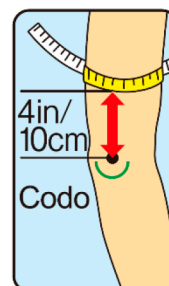

Con los codos ligeramente flexionados, mide el contorno de tu brazo 10 cm por encima del codo, tal y como se muestra en la ilustración.

**CARACTERÍSTICAS**

## Características

**Línea de vendaje funcional alineado con la estructura del musculo, suprime el movimiento excesivo que genera fatiga. Aplica compresión adecuada desde la muñeca hasta la parte superior del brazo.**

---

**Altamente transpirable, comodidad durante todo el día.**

---

El material altamente absorbente mejora la comodidad al absorber y difundir rápidamente el sudor.

---

**Fácil de estirar y mover**  
Con fibra LYCRA® altamente elástica, apta para una amplia gama de movimientos.

---

**Protección UV**

**Línea de vendaje funcional**

**Ajuste cómodo y libertad de movimiento**


LYCRA® es una marca registrada de The LYCRA Company.

## INDICACIONES


Reducir el movimiento muscular excesivo que provoca fatiga.

## INSTRUCCIONES DE USO


1. Pase el brazo por el agujero más grande de modo que la marca en forma de "V" quede en el dorso de la mano.

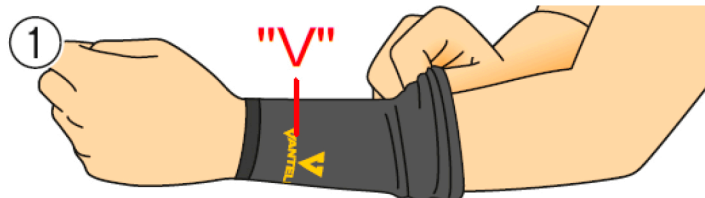

2. Suba la manga de modo que la parte redondeada quede alineada a la altura del codo como se muestra en la ilustración.

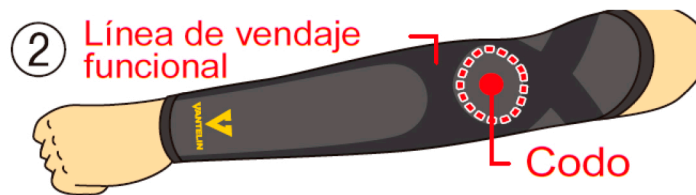

3. Tire del anclaje superior hacia el brazo y ajuste toda la manga para estirla.

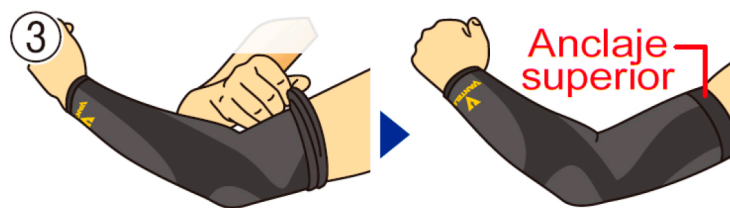

Usar directamente sobre la piel. La talla S-M tiene una marca (I) y la talla M-L tiene una marca (II) del mismo color que la manga, dentro del anclaje superior. Si el producto no se coloca correctamente, es posible que no funcione según lo previsto.

## ADVERTENCIA

- No utilizar si tiene (1) anomalías incluyendo hinchazón o dolor fuerte debido a un esguince, fractura, lesión de ligamentos, etc., (2) trastornos vasculares periféricos, (3) anomalías como alguna lesión, hinchazón, o sarpullido en donde se va a utilizar el producto, o (4) dermatitis crónica / alergia a textiles químicos o látex. Detenga su uso inmediatamente y consulte a su médico si presenta síntomas como: sarpullido / enrojecimiento, picazón, erupción, congestión, dolor anormal o hinchazón. Deje de usar el producto inmediatamente si siente molestias.
- Use solamente según lo indicado.
- Use la talla correcta.
- No utilice mientras duerme.
- No use dos capas.
- Puede causar trastornos de la circulación sanguínea, trastornos de la piel o trastornos neurológicos, preste atención a los siguientes puntos cuando lo use: (1) No mantenga los codos muy flexionados durante un periodo prolongado. (2) Póngase y quítese el producto repetidamente según corresponda cuando lo utilice durante un período prolongado.

## INSTRUCCIONES DE CUIDADO (Utiliza una bolsa de lavado)

1. Lavar por separado, por debajo de los 40°C.
2. No usar blanqueador.
3. No secar a máquina.
4. Colgar y secar al aire. Evite que reciba luz solar directamente.
5. Planchar a baja temperatura. No planchar al vapor. Utilizar un paño de planchado. No planchar la parte impresa ("V").
6. No lavar en seco.



## PRECAUCIONES RELATIVAS AL ALMACENAMIENTO Y LA MANIPULACIÓN

1. Mantener el producto alejado del fuego o del calor excesivo.
2. Mantener fuera del alcance de los niños.
3. Existe el riesgo de romper el producto si es usado de manera incorrecta o si se aplica una fuerza parcialmente desmedida.

## EMBALAJE

2 unidades por caja  
Para el brazo derecho y el izquierdo

## RESPONSABLE DE PRODUCTO

Kowa Company, Ltd.  
Comercializado por: Inversiones La Esperanza (Chile) Ltda.  
Dirección: Av. Apoquindo No 3472, Of. 1201, Las Condes, Santiago, Chile. TÉCNICA